

# **FarStar**<sup>®</sup>

**medical**



## **REF 34100**

### **Produktinformation**

#### **FarStar partikelfiltrierende Halbmaske Serie 30000**

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

**FarStar<sup>®</sup> medical GmbH**  
Hanskampring 12, D-22885 Barsbüttel

## Produktinformation

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung



### Produktbezeichnung:

FarStar® Atemschutzmaske FFP2 NR

Produkt-Nummer / REF: 34100

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

zum Schutze gegen nicht leichtflüssige und feste Partikel.

**Die Masken schützen den Träger und die Umgebung vor Tröpfchen und Aerosolen bis zu deren 10-fachen gültigen Grenzwert.**

### Achtung:

**Maximale Einsatzdauer: eine Arbeitsschicht (8 Stunden)**


Die partikelfiltrierende Halbmaske bedeckt die Nase, den Mund und das Kinn. Die Halbmaske besteht im Wesentlichen aus einem Filtermedium, welches zwischen Innen- (dem Gesicht zugewandtem) und Außenvlies in einem Ultraschall-Verfahren fixiert ist.

Der Nasenbügel ist einfach zu formen und lässt sich optimal individuell am Nasenrücken anpassen. Er bleibt auch nach längerer Tragezeit stabil.

Die Polsterung aus weichem Polyurethan ermöglicht eine optimale Anpassung an die Gesichtsform und stellt sicher, dass Brillen nicht beschlagen.

Filtermedium  
mit Innen- und Außenvlies


Kopfbänderung

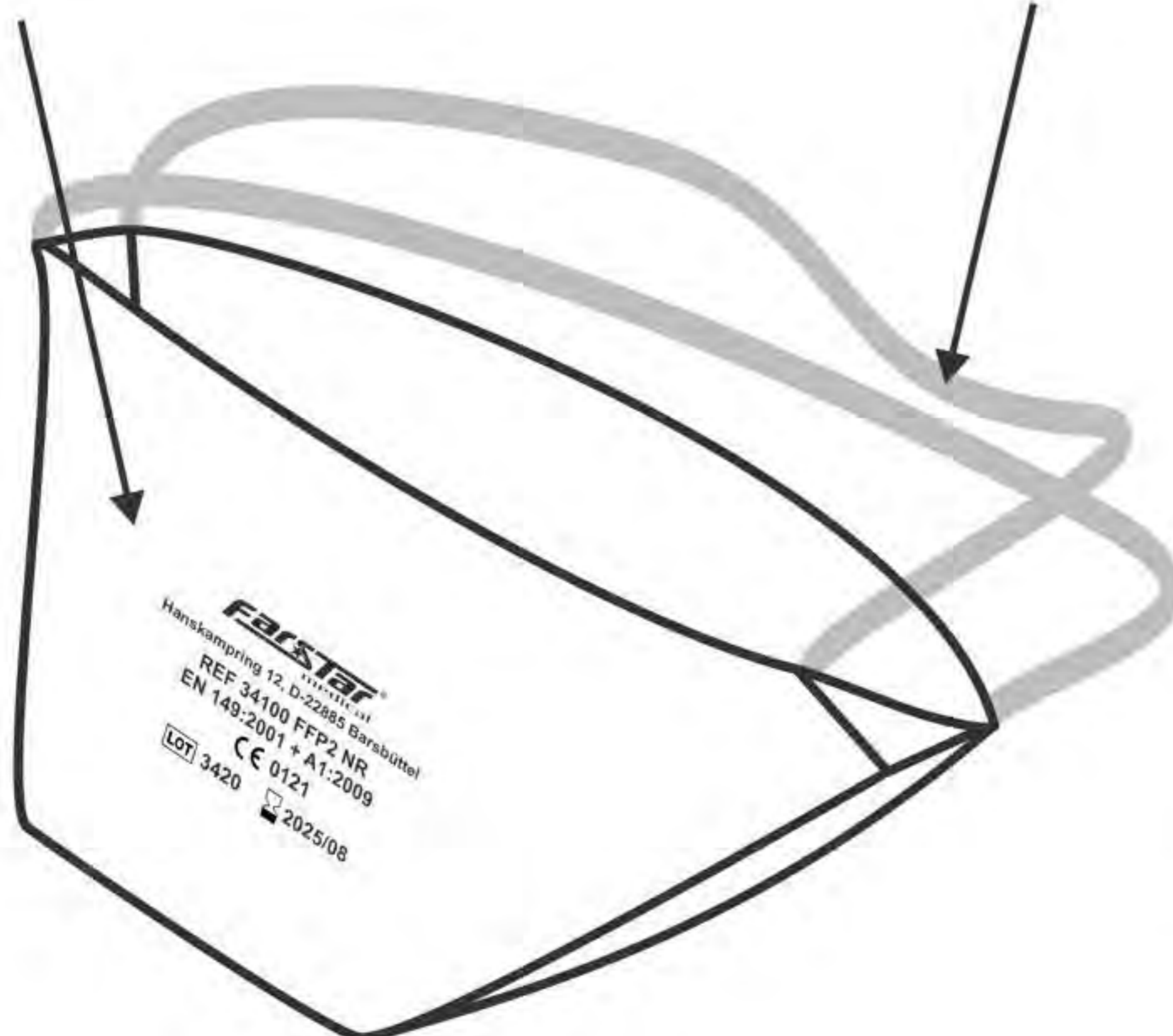

Außenvlies

Innenvlies

PU - Nasenschaum

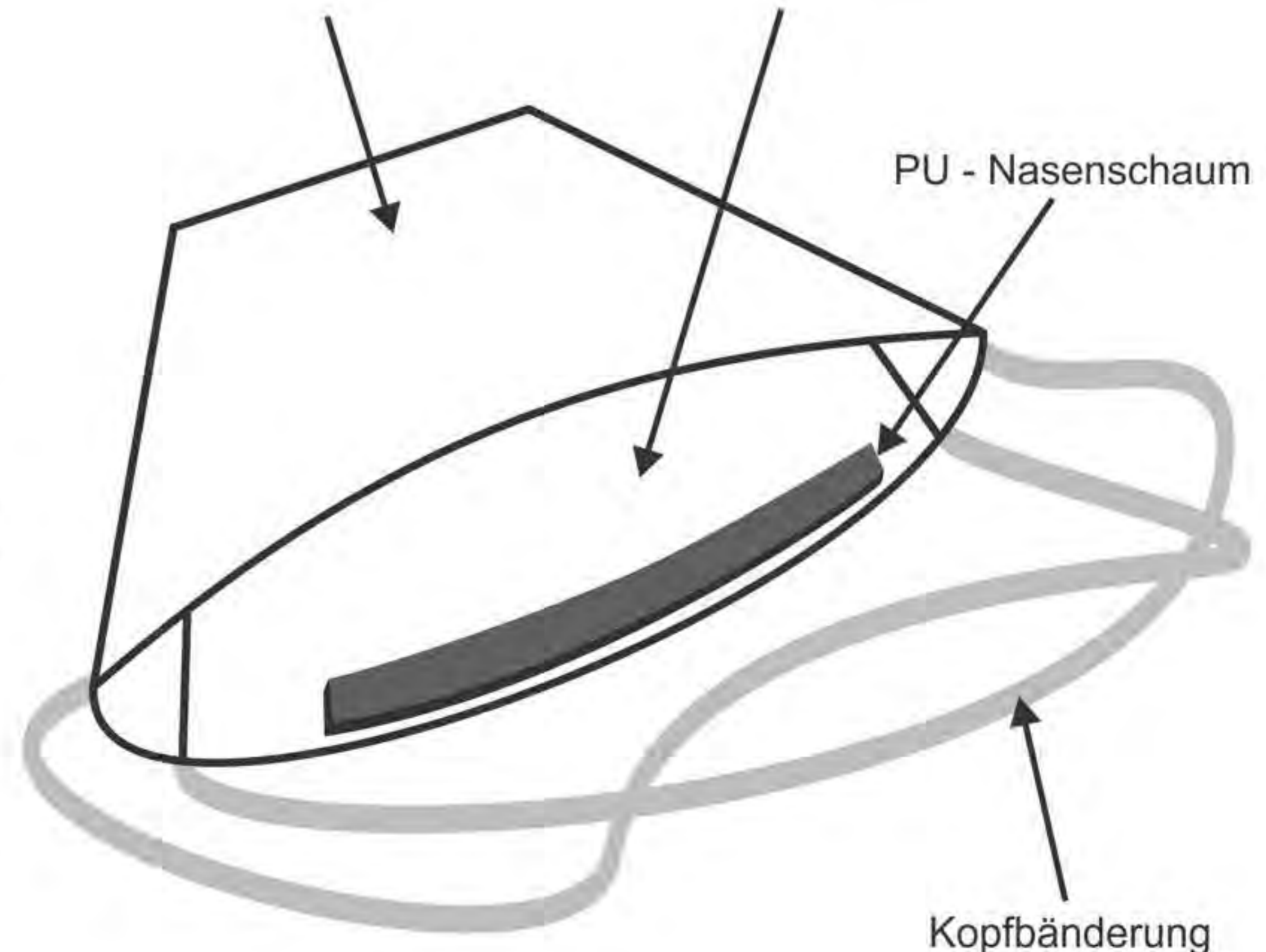

Kopfbänderung

## Produktinformation

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

### Verwendete Materialien:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Kopfbänder               | Lycra mit Polyester    |
| PU-Schaumstoffpolsterung | Polyurethan            |
| Nasen Clip               | Aluminium              |
| Filter                   | Meltblown Polypropylen |
| Front Verstärkung        | Polyester              |
| Außenvlies               | Polypropylen           |
| Innenvlies               | Polypropylen           |

**Produktleistung:** Farstar partikelfiltrierende Halbmaske erfüllt alle Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 für die Geräteklasse FFP2.

| Filterdurchlass                      | Sollwerte nach Norm |
|--------------------------------------|---------------------|
| Prüfung mit Paraffinöl-Aerosol       | Max. 6%             |
| Prüfung mit Natriumchlorid Aerosol   | Max. 6%             |
| Gesamtleckage                        | Max. 8%             |
| Atemwiderstand Einatmen/ 95 l/min    | Max. 240 Pa         |
| Atemwiderstand, Ausatmung/ 160 l/min | Max 300 Pa          |

**Hautverträglichkeit:** Die Schutzmasken sind frei von Stoffen die Reizungen oder irgendeine andere nachteilige Wirkung auf die Gesundheit haben (geprüft gem. DIN EN ISO 10993).



## Produktinformation

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung




**Aufsetzanleitung: siehe Abbildung**

- Mit der Rückseite nach oben entfalten Sie die Maske, indem Sie die Ober- und Unterseite so auseinanderziehen, dass eine Schale entsteht. Formen Sie den Nasenbügel vor, indem Sie ihn in der Mitte leicht biegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maske auseinandergefaltet ist und greifen Sie die Maske mit einer Hand, so dass die offene Seite zum Gesicht zeigt. Nehmen Sie beide Kopfbänder in die andere Hand. Setzen Sie die Maske, mit dem Nasenbereich nach oben, unterhalb des Kinns an und ziehen Sie die Bänder langsam über den Kopf.
- Ziehen Sie das untere Band bis unter die Ohren und das obere Band auf den Hinterkopf.
- Positionieren Sie den oberen und den unteren Teil des Maskenkörpers so, dass Sie einen bequemen Sitz erhalten und stellen Sie sicher, dass keine Maskenteile nach innen gefaltet sind.
- Jetzt mit beiden Händen den Nasenbügel Ihrer Nasenform anpassen um einen sicheren Sitz zu erreichen.

Überprüfen Sie jetzt den Dichtsitz der Maske wie folgt:

Bedecken Sie die Maske mit beiden Händen und atmen Sie stark aus!

Bei einer Leckage (Luftströmung) im Nasenbereich, den Nasenbügel neu anpassen, bei einer Leckage an den Maskenrändern, den Sitz der Bänder überprüfen. Dichtsitz erneut überprüfen.

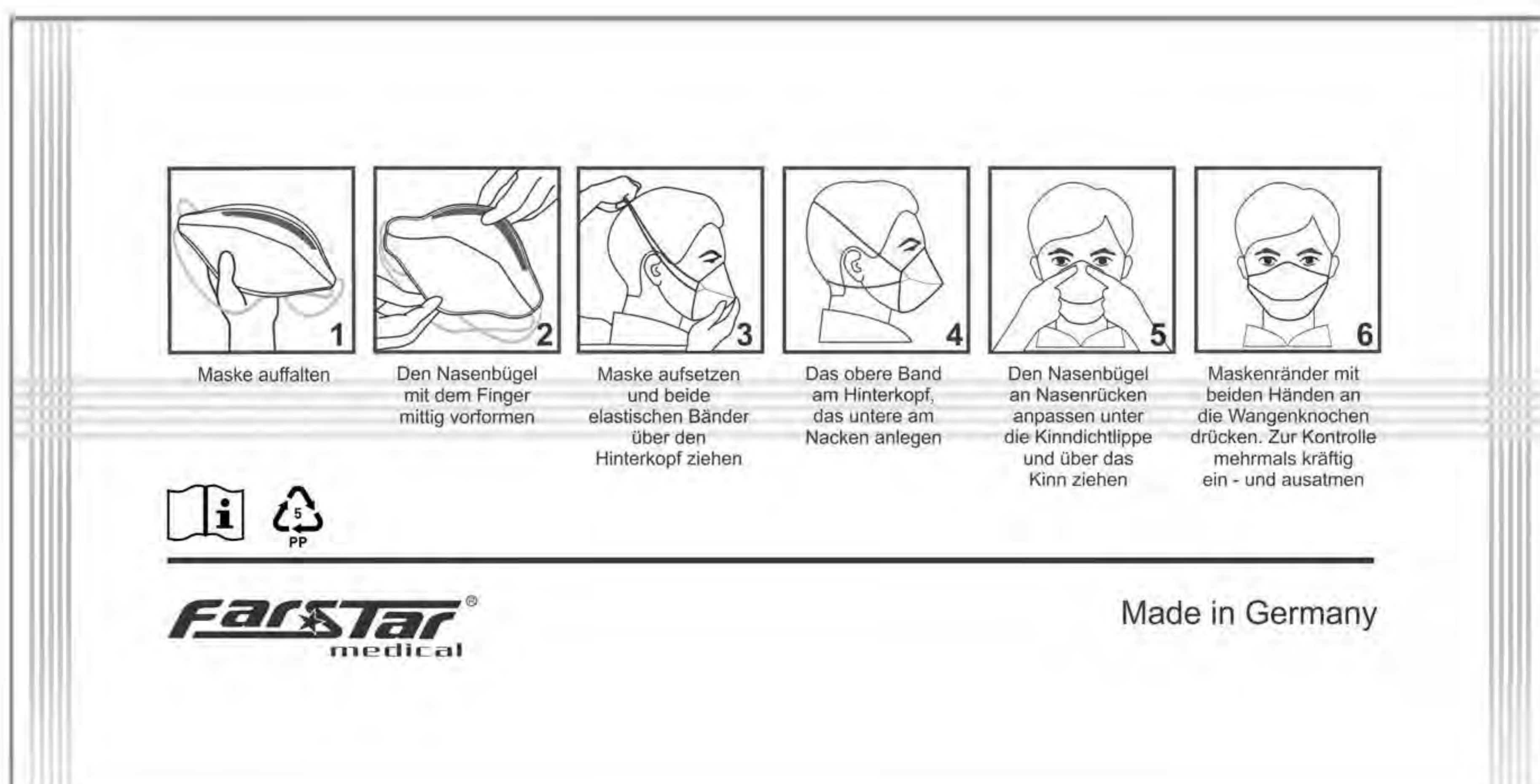


# Produktinformation

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

## Lagerung

Die partikelfiltrierende Maske hat eine Lagerdauer von 5 Jahren. Die Information über die Verw. Dauer ist auf der Maske selbst und auch auf jeder Verpackungsstufe angegeben.

Die Masken sind in einem Temperaturbereich von – 20 bis + 40°C und bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 % zu lagern. Verwenden Sie bitte für Lagerung und Transport die Original-Verpackungen.

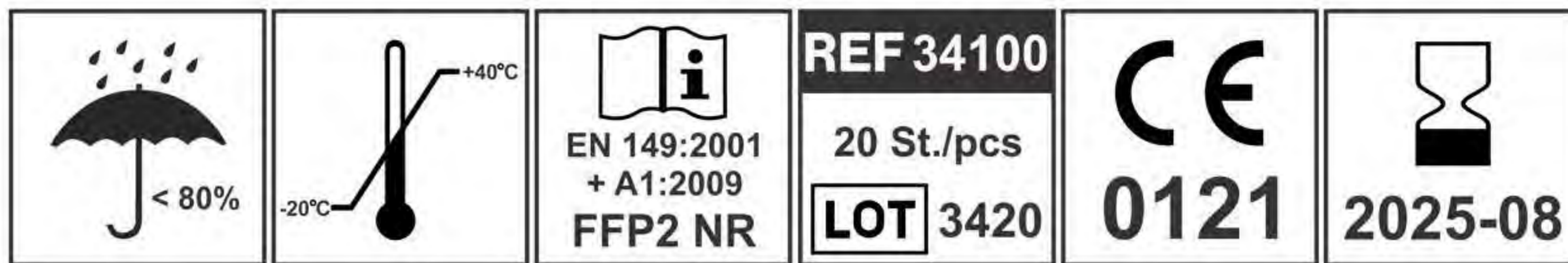

## Allgemeine Hinweise

Richtige Auswahl, Schulung und Gebrauch sind Voraussetzungen, dass das Produkt den Anwender vor luftübertragenen Gefahrenstoffen schützt.

Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Diese muss mindestens 17 VOL % Sauerstoff enthalten!

Die Masken bieten keinen Schutz gegen Gase und Dämpfe.

Personen mit Bärten im Bereich der Dichtlinien der Atemanschlüsse erzielen keinen ausreichenden Dichtsitz! Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn das Atmen schwierig wird oder Schwindel und Erschöpfung eintritt. Die Masken sind für den einmaligen Gebrauch (Kennzeichnung NR = Non Reusable) vorgesehen.

Die Gebrauchsdauer soll nicht einen achtstündigen Arbeitstag überschreiten. FFP-Masken als Einwegprodukte sind nach Benutzung zu entsorgen.

Die Masken nicht in explosiver Atmosphäre benutzen.

Weitere Informationen: siehe Gebrauchsanleitung.



## Produktinformation

FarStar FFP2 NR Atemschutzmaske geprüft und zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 149:2001+A1:2009 durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Information für die Anwender im Gesundheitswesen:

(TRBA 255/Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas))

„ In folgenden Fällen sind mindestens FFP2-Masken von den Beschäftigten zu tragen:

- 1. Bei der Untersuchung, Behandlung, Pflege und Versorgung von Patienten, die an einem pandemischen Virus der Risikogruppe 3 bzw. bisher aufgrund unzureichender Erkenntnisse noch nicht eingestuften pandemischen Virus erkrankt sind oder die als Verdachtsfall gelten.*
- 2. Bei der Untersuchung, Behandlung, Pflege und Versorgung von Patienten, die an einem pandemischen Virus, das in die Risikogruppe 2 eingestuft ist, erkrankt sind oder die als Verdachtsfall gelten, wenn die Patienten keinen Mund-Nasen-Schutz \* tragen.*
- 3. Wenn präsymptomatische oder asymptomatische Übertragungen bei einem pandemischen Virus beschrieben sind, ist bei Pflegebedürftigen ohne Symptomatik bei gesichtsnahen Tätigkeiten eine FFP2-Maske zu tragen, wenn der Pflegebedürftige keinen Mund-Nasen-Schutz \* trägt und im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine Infektionsgefahr gegenüber einem pandemischen Virus nicht hinreichend ausgeschlossen werden kann.*
- 4. Bei Tätigkeiten am bzw. im Umfeld eines Patienten mit Infektionsverdacht oder mit bestätigter Infektion, bei denen ein hohes Infektionsrisiko durch Aerosole, z.B. bei Bronchoskopie, Intubation oder beim Absaugen besteht, sind FFP3-Masken zu tragen."*

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf [www.farstar-medical.de](http://www.farstar-medical.de) , rufen Sie uns an 040-2385550 oder senden Sie uns eine Email ([info@farstar-medical.de](mailto:info@farstar-medical.de))

Wir sind gerne für Sie da!

FarStar medical GmbH  
Hanskampring 12  
22885 Barsbüttel

\* Mund-Nasen-Schutz = Medizinische Gesichtsmaske

---